

코로나19 신속항원검사(개인용) 안내문

○ 신속항원검사(개인용) 대상자는?

유전자 검사(PCR) 우선순위 대상 외 검사 희망자, 방역패스 필요자!

※ 유전자 검사(PCR) 우선순위 대상자: 만 60세 이상 고령자 / 코로나19 의심증상이 있는 자 / 역학적 연관성이 있는 자 / 감염취약시설 선제검사 / 신속항원·응급선별 검사 양성자

○ 검사절차 및 조치

접수 및 안내

본인 확인(신분증 지참 필수) 및 검사신청서 작성
※ 음성확인서가 필요한 경우, 신청서 검사이유에 '방역패스용' 체크

검체 채취 및 검사 수행

보건소 직원의 안내에 따라 검체(비강도말물) 채취 및 검사수행
※ 제품 사용자 설명서 참고

결과 확인

검사결과가 나올 때까지 별도 장소에서 대기
※ 보건소 직원이 검사결과를 확인하기 전까지 자리 이탈 금지
※ 소요시간: 15분~30분

조치

검사결과 양성 시, 유전자(PCR)검사 필수! 음성 시에도 방역수칙 준수!

○ 양성 시 조치사항

직원의 안내에 따라 유전자 검사(PCR)를 위한
검체 채취 장소로 이동

○ 음성 시 조치사항

집으로 귀가조치(필요 시 방역패스 발급)
※ 음성이라도 안심하지 말고 방역 수칙 철저히 준수!

○ 신속항원검사 시, 주의사항

- ① 검사 등을 기다리는 동안 가능한 타인과 접촉을 최소화하고 일정 거리두기 유지
- ② 검체 채취 외 검사결과를 기다리는 동안 반드시 마스크 착용
- ③ 검사 시 신속항원검사 제품에 검체 외 이물질 혼입 금지
- ④ 보건소 직원이 검사결과를 확인하기 전까지 자리 이탈 금지

코로나19 확인검사법은 유전자 검사임. 신속항원검사로는 확진 불가

신속항원검사(개인용) 안내문

※ 본 안내는 신속항원검사 제품의 일반적인 사용법입니다. 제품에 따라 사용법에 차이가 있으므로, **제품별 사용설명서를 따라 정확하게 검사**하시기 바랍니다.

검사전 준비사항

- 손을 깨끗이 씻고, 완전히 말립니다. *일회용 장갑 사용 권장
- 제품 구성품을 확인하고, 평편한 곳에 꺼냅니다.
- 시험단계에 따라 제품 포장지를 제거합니다.


검사시 주의사항

- 제품에 검체 외 이물질을 투입하지 않습니다.
- 제품 사용설명서에 명시된 검사반응 시간*을 반드시 지켜야 합니다. *15분 이상


검사 결과 확인



음성 대조선(C라인)만 나타난 경우(1줄)

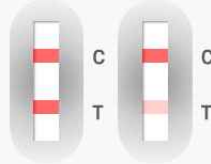

양성 대조선(C라인)과 시험선(T라인) 모두 나타난 경우(2줄)

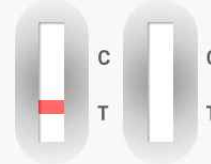

무효 대조선(C라인)이 나타나지 않은 경우
*재검사 필요

검사결과 양성이면?

- 두 줄로 확인된 키트를 투명한 봉투에 넣고 밀봉하여 지참하고, 신속하게 선별진료소 또는 임시 선별검사소에 방문합니다.
- 신속항원검사 양성자임을 알리고 PCR 검사(비인두도말 검체 채취)를 받습니다.
- PCR 검사 결과가 확인될 때까지 자택에서 대기합니다.

【이동 시 주의사항】

- 이동 시 반드시 마스크(KF94 또는 동급 이상) 착용, 가능한 타인과의 접촉 최소화
- 대중교통 이용을 자제하고, 자차 등을 활용하여 이동

검사결과 음성이면?

- 사용한 구성품을 모두 폐기물 봉투에 넣어 밀봉하고, 종량제 봉투에 넣어 생활폐기물로 처리합니다.
- 검사 결과 음성이라도, 마스크 착용 등 방역수칙은 반드시 준수합니다.
- 임상증상이 있는 경우 가까운 의료기관을 방문하여 진료를 받으시기 바랍니다.